
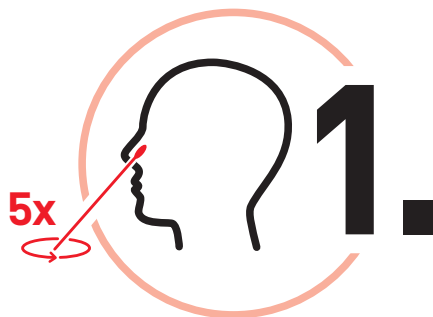


# 6 Schritte-Anleitung zum Antigen-Selbsttest



COVID-19 Antigen Test FLOWFLEX

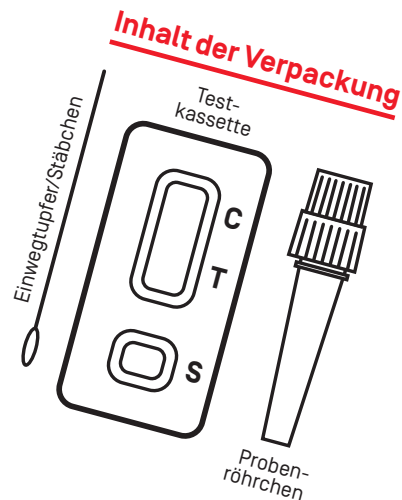

**1.** Tupfer **ca. 2,5 cm** in ein Nasenloch einführen  
Das Stäbchen **5 Mal drehen**, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen  
Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken  
Das Stäbchen einführen und **30 Sekunden** umrühren


Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens **5 Mal drehen**. Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

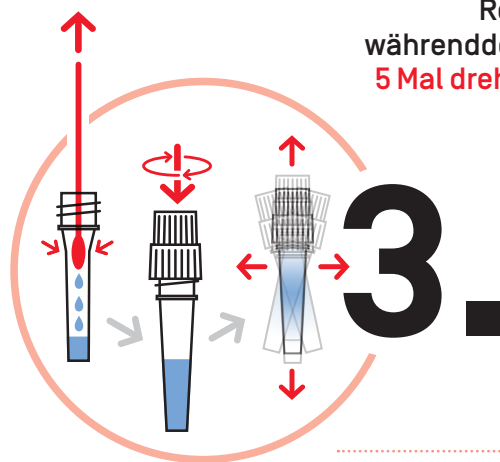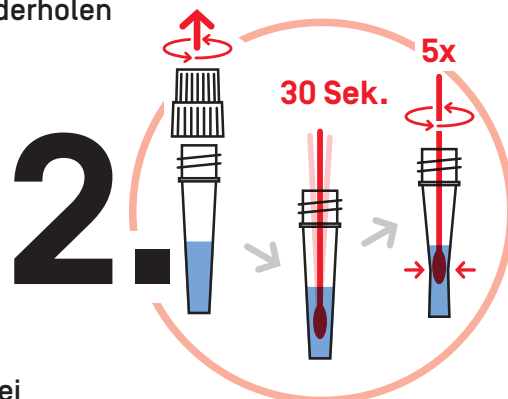

**3.** Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken  
Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen  
Röhrchen wirbeln und schütteln


Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen  
Kappe von der Tropferspitze abdrehen  
Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und **4 Tropfen** auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

Wichtig: Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf sie daher nicht gedreht, geschüttelt oder bspw. von einem Raum in den anderen getragen werden.

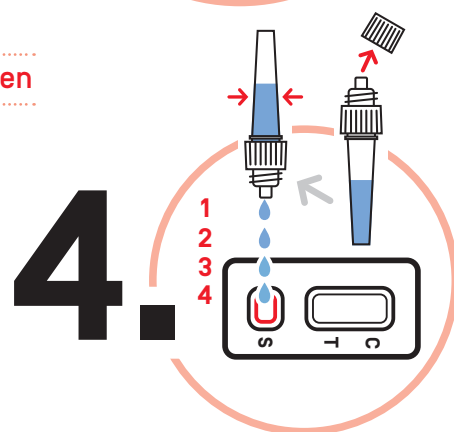

**5.** **15 Minuten** warten  
Das Ergebnis ablesen

Ergebnisinterpretation

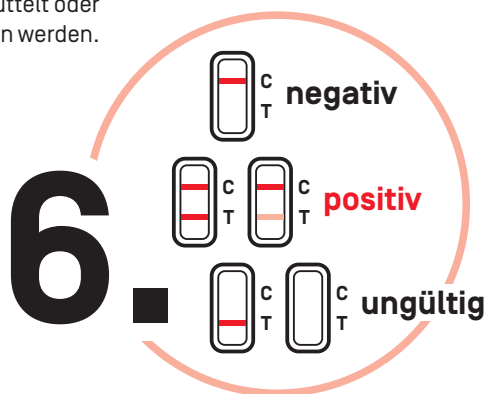

**POSITIV? → 1450 anrufen!**

**NEGATIV? Weiterhin gesund bleiben!**

**Disclaimer:** Diese Anleitung dient einer übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellung der Testabläufe bei einer Eigenanwendung von anterio-nasalen COVID-19-Antigen-Schnelltests. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung von COVID-19-Antigen-Schnelltests immer entsprechend der Gebrauchsinformation des jeweiligen Herstellers oder Inverkehrbringers zu erfolgen hat. Lesen Sie daher bitte vor Verwendung eines COVID-19-Antigen-Schnelltests die beiliegende Gebrauchsinformation genau durch und befolgen Sie die darin vorgegebene Anleitung! Die Österreichische Apothekerkammer übernimmt keine Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Verwendung der Inhalte dieser Anleitung entstehen können.

